

INSTRUCCIONES DE USO PILARES DE CICATRIZACIÓN

1. Descripción del producto

Los pilares de cicatrización son elementos de titanio dotados de cabeza en un extremo y de una rosca en el otro para ser atornillada en el implante.

2. Uso previsto

La finalidad de uso del producto es mantener la apertura de los tejidos, una vez retirado el tornillo de cierre, durante cicatrización (15 días aproximadamente). Esta apertura epitelial posibilitará la conexión entre el implante y la sobre-e cictura.

Indicaciones de uso

El pilar de cicatrización se utiliza como un pilar transmucoso auxiliar. Se coloca en el implante antes de tauración protésica, facilitar la formación de un surco de tejido blando. Debe elegirse la altura correcta para asegurar correcta sionamiento y evitar la transmisión de las fuerzas de masticación.

4. Contraindicaciones

Alergia e hipersensibilidad a los componentes químicos de los materiales usado canio biocom ole).

5. Efectos secundarios e interacciones

Se recomienda seguir las instrucciones de uso recomendadas por el fabricante. Un us debido del oducto puede derivar en daños al paciente.

6. Limpieza, desinfección y esterilización

Los pilares de cicatrización se comercializan sin este de utiliza el profesa a debe realizar la limpieza y proceder a su esterilización.

Bioner SA recomienda realizar siempre una pieza previa con proctos de uso en el sector dental, apoyándose en baños de ultrasonidos o en métodos automáticos de la jeza y desinfección y la o proceder a su esterilización.

Antes de esterilizar, deben trasperados prodes de su envase con nal a otro adecuado para tal efecto.

La esterilización deberá r varse en autoclave de vapo. La a 121ºC durante 15 minutos o 134ºC a 3 minutos mínimo, según UNE-EN-ISO 17665-1:20 en bolsas contrata de la terilización.

No use el producto despues esterilización s' observa cualquier deterioro en el envase.

Los pilare cicatorión, así como todos la cultamentos producidos por Bioner SA, no deben de ser reutilizados; son productos de un como uso.

7. Adv ncias

aspundo debe como parse que el material está en perfecto estado y no existen piezas desensambladas, para evitar la aspundo o de un de o de todos los componentes. Además, se recomienda especialmente comprobar que el producto está linto o videsimo de o y que la zona de conexión al paciente está limpia y libre de residuos.

El profesio que utilice el producto de referencia deberá tener experiencia para usarlo de forma segura y adecuada a las instrucciones de uso cilitadas por BIONER SA, siendo responsabilidad del mismo profesional la aplicación de dicho elemento a las necesidades del recente.

ecauciones

Debe tenerse especialmente en cuenta que cada referencia debe usarse en combinación con elementos dimensionalmente compatibles y que se indican en la propia etiqueta del producto.

9. Compatibilidad

Las referencias de la familia de pilares de cicatrización BIONER no deben ser usados conjuntamente con componentes no compatibles. Antes de su colocación es necesario revisar los componentes disponibles en el catálogo de productos de la compañía para su correcta elección.

Las dimensiones de las cotas aseguran la compatibilidad con los componentes con los que se combinará cada referencia concreta. La garantía de la compatibilidad de cada referencia se apoya en los controles del proceso de fabricación de BIONER SA.

10. Procedimiento

Efectuar las siguientes comprobaciones:

- Antes de colocarlo, asegurarse que la plataforma del implante queda libre de cualquier residuo de tejido
- Utilice un torque manual suave

11. Validez

Estas instrucciones de uso corresponden a la primera versión vigente de la referencia de las referencias de la fam pilares de cicatrización, indicada a pie de documento

12. Almacenamiento

Los elementos de dicha familia deben conservarse y almacenarse en condiciones ambientales no extenso as, evitando la exprolongada a la luz solar.

Símbolo ISO 15223	Desc
▼ To open ▼	Indicativo de la dirección de tura d'uster
**BIONER	Logotipo Bioner S.A.
ш	Fabric
REF	Refei de catálogo
LOT OFAAXXXXX	Código de lote
M DD/M	Fecha de fabricación
Ţ.	Consultar instrucciones de uso
Don't use in uamaged	No utilizar si el envase está dañado
NON STERLE	No estéril
	No reutilizar
Mat=	Indicativo genérico del material constructivo
	Indicativo de la cantidad que contiene cada blíster
	Código QR (referencia y lote)
(€ 0051	Marcado CE

Datos del fabricante:

Nombre: BIONER, S.A.
Dirección: Espigolera, 9 08960 Sant Just Desvern
Tel: 934 700 360 / F: 934 703 527
e-mail: bioner@bioner.es
Web: www.bioner.es



